

Gebruikershandleiding Proflebo All-in 1



Materiaal: 40D Polyester
Coating: PU, Siliconen

- Hulp bij aan- en uittrekken in één voor kousen met zowel open als gesloten teen
- Makkelijk in gebruik
- Stevig en duurzaam
- Wasbaar op 30 graden handwas

Product: **Proflebo All-in 1**

Art. nr : **PR-1001 NL** 



proflebo
CARE SOLUTIONS, GOOD LIFE

www.proflebo.com

Piet Heinstraat 11 A, 7204 JN Zutphen (NL)

Aantrekhelp Proflebo All-in-1 (open teen)

- 

Steek uw voet in de aantrekhelp
- 

Trek de kous tot net boven uw enkel over de aantrekhelp
- 

Trek de kous op de juiste plek
- 

Pak de zwarte lus van de aantrekhelp vast
- 

Trek aan de zwarte lus tot de aantrekhelp uit is.

Aantrekhelp Proflebo All-in-1 (gesloten teen)

- 

Positioneer uw voet zoals aangegeven
- 

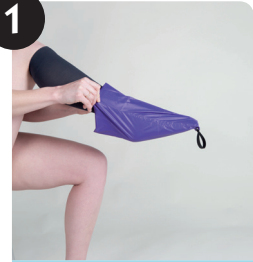
Steek uw voet in de steunkous
- 

Trek de kous tot op de juiste plek
- 

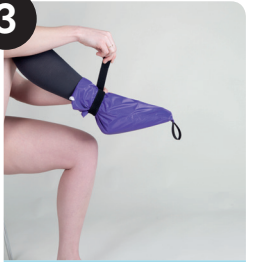
Open de band
- 

Trek aan de aantrekhelp totdat deze eruit is

Uittrekhelp Proflebo All-in-1

- 

Trek de aantrekhelp aan over uw kous
- 

Wikkel het elastiek boven de enkel om uw aantrekhelp
- 

Trek het elastiek stevig vast
- 

Rol de kous van boven over het elastiek
- 

Pak uw kous vast en trek de kous uit