

⚠ WAARSCHUWING: Om het risico op verwondingen door onjuist en onveilig gebruik van deze wandelstok te minimaliseren, leest u deze instructies en veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door voor gebruik.

Beoogd gebruik:

Deze wandelstok is een wandelhulp voor mensen met verminderde mobiliteit.


Veiligheidsvoorschriften:

- Raadpleeg een professional voordat u een ondersteunend mobiliteitsmiddel gaat gebruiken.
- Niet te gebruiken door personen zwaarder dan 159 kg.
- Niet bedoeld om het volledig gewicht van de gebruiker te ondersteunen.
- Niet bedoeld voor gebruik op ijs of gladde ondergrond, omdat het risico op uitglijden bestaat.
- Alleen gebruiken als individuele onderdelen stevig in elkaar zitten, en de drukknop volledig is ingedrukt.
- Zorg er bij het monteren van individuele onderdelen voor dat vingers niet bekneld raken.
- Trek het interne elastische koord niet meer aan dan noodzakelijk tijdens het monteren of demonteren van onderdelen. Gebruik de wandelstok niet als het elastiek gebroken, gerafeld of beschadigd is.
- Neerwaartse druk op de basis (bijv. op de basis stappen) tijdens het omhoog tillen van het handvat kan ertoe leiden dat de onderdelen van de wandelstok losraken en de wandelstok inklappt, wat mogelijk leidt tot een val.
- Als het handvat of de draaiende basis los raken, of als de wandelstok beschadigd raakt, stop dan het gebruik van de wandelstok onmiddellijk.


Indicatie: De wandelstok is geschikt voor gebruik bij: moeilijkheden bij wandelen door beperking van het actieve of passieve musculoskeletale systeem; coördinatieproblemen tijdens wandelen en minder flexibiliteit.

Contraindicatie: De wandelstok is niet geschikt voor gebruik bij: waarnemingsstoornissen, ernstig balansverlies, niet kunnen staan, gebruikersgewicht hoger dan 159 kg

MONTEREN

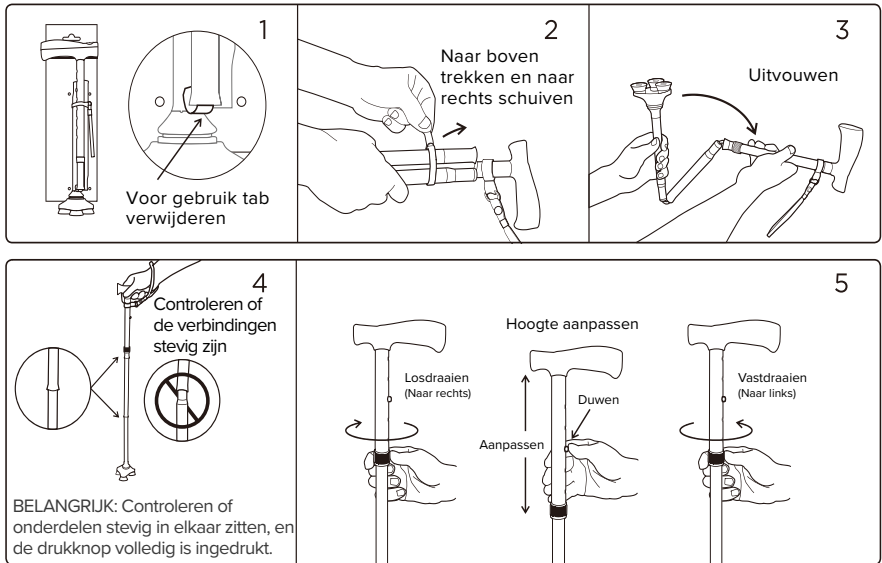

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

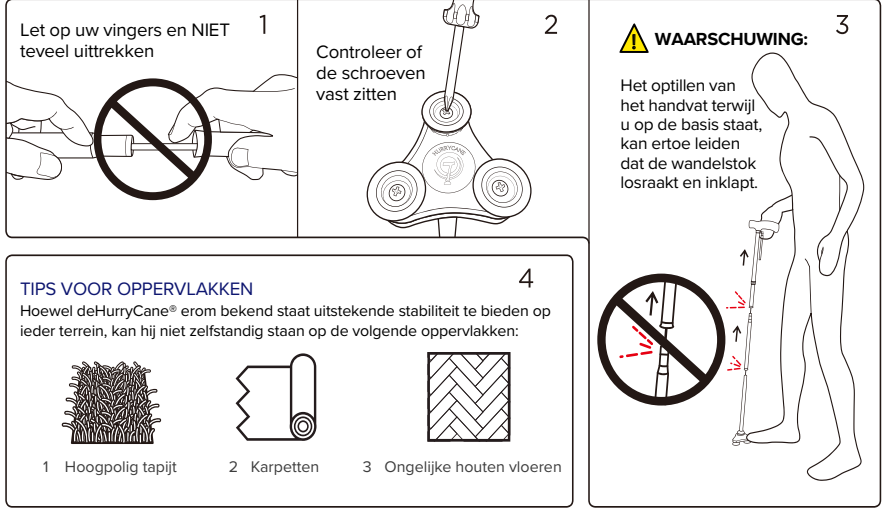

ONDERHOUD

- Controleer het elastische koord voor ieder gebruik. Niet gebruiken als het koord gebroken, gerafeld of beschadigd is.
- Controleer of het handvat en de draaiende basis vast zitten.
- Controleer regelmatig of de schroeven op de doppen vastzitten.
- Vervang de doppen ieder half jaar. Neem contact op met de lokale distributeur voor het aanschaffen van nieuwe doppen.
- Reinig de wandelstok regelmatig met water en een mild schoonmaakmiddel.

SPECIFICATIES

- HurryCane® Freedom Edition™
- Acht verstelbare hoogtes:
Van 77,5 cm tot 95 cm
- Ingeklapt formaat: 35 cm.
- Maximale gebruikersmassa: 159 kg.


Opmerkingen of vragen

Voor hulp bij het gebruik van uw HurryCane® of voor garantie-, verkoop- of klantenservice-informatie neemt u contact op met uw distributeur of verkoper. Neem bij twijfel contact op met Drive DeVilbiss Healthcare Ltd.

Als er zich een ernstig incident voordoet in relatie tot het product, dient u dat te melden bij de fabrikant en de lokale verantwoordelijke autoriteit.


DE FLEX HERSTELLEN

De draaiende basis van een nieuwe HurryCane® is ontwikkeld om in eerste instantie minder flexibiliteit te hebben, maar past zich in de loop der tijd aan de bewegingen van de gebruiker aan. Als de wandelstok zich aan uw bewegingen aanpast, kan het nodig zijn de flex van de HurryCane® te herstellen als u wilt dat de wandelstok naast u staat zonder dat u hem vasthoudt. U herstelt de ‘flex’ eenvoudig in deze drie stappen:

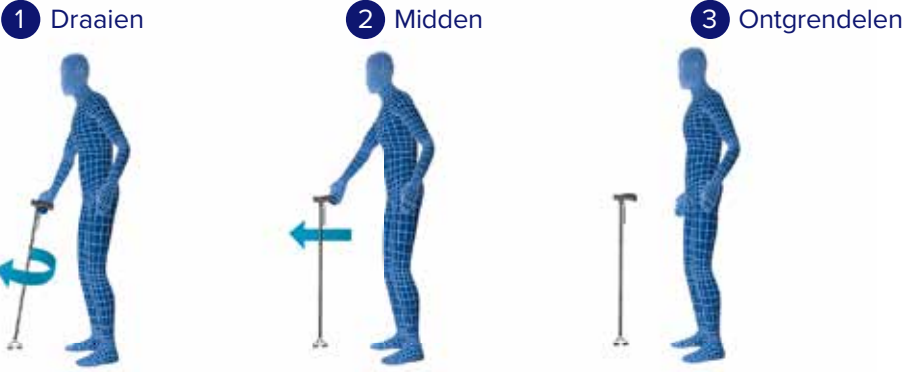

OPMERKING: Als de wandelstok valt, kunt u hem eenvoudig optillen door uw voet op de basis te plaatsen en hem naar beneden te duwen.

AANWIJZINGEN VOOR OPSLAG

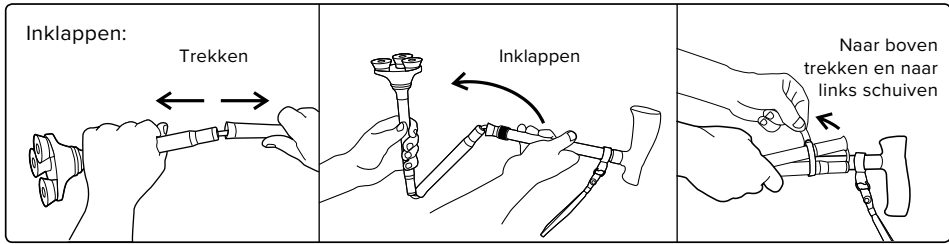

Als het product het einde van zijn levensduur bereikt heeft, volgt u de lokale recycling- en wegwerpvoorschriften.

Com-Da Healthcare Co. Ltd.
No. 1, Jinzhao Street, West District,
Zhongshan City, Guangdong, CN

EC REP

Osmunda Medical Technology
Service GmbH, Treskowallee 108,
10318 Berlin, Duitsland

Drive Medical GmbH & Co. KG,
Leutkircher Strasse 44,
88316 Isny im Allgäu, Duitsland
+49 (0) 7562 9724 0
info@drivedevilbiss.com

Drive DeVilbiss Healthcare Ltd,
Sidhil Business Park, Holmfield,
Halifax, West Yorkshire,
HX2 9TN, Groot-Brittannië
+44 (0) 845 0600 333
info@drivedevilbiss.co.uk

