

Gebruiksaanwijzing

Doc. number: IFU-OCT, Ver.1, MB.2210

Nr.	Product naam	Spec.	Foto
1	Duimbrace RHIZOFIT MB.2210	One Size Links – Rechts: Universeel	

Indicaties:

Alleen te gebruiken door personen met orthopedische problemen.

De Quervain syndroom, behandeling van artritis, letsels aan het metacarpofalangeale gewricht van de duim, behandeling van peesontsteking.

Toepassing:

1. Pas de duimbrace aan naar de gewenste positie.
2. Plaats de brace parallel aan de duim.
3. Bevestig de klittenbandsluitingen op de hoogte van de pols en duim om de brace te stabiliseren.

Belangrijkste eigenschappen:

- Duimbrace gemaakt van ademende stof.
- Anatomische aluminium spalk die naar de hand van de gebruiker kan worden gevormd.
- Binnen kussen onder de spalk voor comfort en pasvorm.
- Klittenbandsluitingen rond de pols en rond de duim voor een betere immobilisatie van de duim.
- Immobiliseert en ondersteunt de duim, terwijl de handpalm vrij blijft.

Gebruiksaanwijzing:

De initiële aanbrenging van de brace dient te worden uitgevoerd door een professional om een juiste pasvorm en efficiëntie te garanderen. In uitzonderlijke gevallen kan het bij zeer gevoelige gebruikers irritatie veroorzaken. In dat geval dient u contact op te nemen met uw arts. Niet te gebruiken in water. Aanbevolen productgebruik tot 2 jaar.

Reiniging en onderhoud

Handwas met koud water. Gebruik een mild reinigingsmiddel.

Niet wassen in de wasmachine of drogen in de droger.

Opslagconditie:

Zorg ervoor dat de producten worden opgeslagen op een droge plaats, vermijd hoge temperaturen (niet hoger dan 50°C) en vochtigheid (45%-90%).

In geval van een incident kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

Contact informatie:



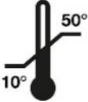
A. Salemis & CO., LP "Medical Brace"

22, Tegeas st, Peristeri, PC.12133, Athens, GREECE

Tel: +302105984020 / email: mb@medicalbrace.gr

www.medicalbrace.gr

Symbolen op het etiket:

	CE-markering		Fabrikant
	Raadpleeg de Gebruiksaanwijzing		Medical device
	Niet-steriel		UDI
			Opslagtemperatuur
	Vermijd zonlicht		Houd droog