

Gebruiksaanwijzing

Doc. number: IFU-OCT, Ver.1, MB.2303

Nr.	Product naam	Spec.	Foto
1	Neopreen elleboogsteun DOUBLE LOCK met siliconen MB.2303	One Size Links – Rechts: Universeel	

Indicaties:

Alleen te gebruiken door personen met orthopedische problemen.
Behandeling van laterale epicondylitis (tenniselleboog).

Toepassing:

1. Breng de brace aan zodat het binnenkussen op het condylus gebied rust.
2. Breng de omtrekband aan en pas de compressie aan tot het gewenste niveau.

Belangrijkste eigenschappen:

- Materiaal van neopreen, uniek ontworpen voor comfort.
- Gelkussen gevoerd met hoogwaardige ademende stof.
- Verstelbare band voor een gelijkmatige pasvorm en druk op specifieke punten.
- Wasbaar.
- Klittenbandsluiting voor eenvoudige toepassing.

Gebruiksaanwijzing:

De initiële aanbrenging van de brace dient te worden uitgevoerd door een professional om een juiste pasvorm en efficiëntie te garanderen. In uitzonderlijke gevallen kan het bij zeer gevoelige gebruikers irritatie veroorzaken. In dat geval dient u contact op te nemen met uw arts. Niet te gebruiken in water. Aanbevolen productgebruik tot 2 jaar.

Reiniging en onderhoud

Handwas met koud water. Gebruik een mild reinigingsmiddel.
Niet wassen in de wasmachine of drogen in de droger.

Opslagconditie:

Zorg ervoor dat de producten worden opgeslagen op een droge plaats, vermijd hoge temperaturen (niet hoger dan 50°C) en vochtigheid (45%-90%).

In geval van een incident kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

Contact informatie:



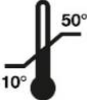
A. Salemis & CO., LP "Medical Brace"

22, Tegeas st, Peristeri, PC.12133, Athens, GREECE

Tel: +302105984020 / email: mb@medicalbrace.gr

www.medicalbrace.gr

Symbolen op het etiket:

	CE-markering		Fabrikant
	Raadpleeg de Gebruiksaanwijzing		Medical device
	Niet-steriel		UDI
			Opslagtemperatuur
	Vermijd zonlicht		Houd droog