

Gebruiksaanwijzing

Doc. number: IFU- OCT, Ver.1, MB.2320

Nr.	Product naam	Spec.	Foto
1	Elastische elleboogsteun MB.2320	Elleboog omvang (cm) Maat: S(21-25), M(24-29), L(26-31), XL(29-33), XXL (33-37)	

Indicaties:

Alleen te gebruiken door personen met orthopedische problemen.
Ligament- en peesletsels

Toepassing:

1. Schuif de hand van de gebruiker in de brace.
2. Zorg ervoor dat de brace de elleboog van de gebruiker correct bedekt.

Belangrijkste eigenschappen:

- Elastische elleboogsteun, gemaakt van hoogwaardige, duurzame stof.
- Speciaal ontwerp zorgt voor gemakkelijke gewrichtsbeweging.
- Geschikt voor werk, sport en vrije tijd.
- Wasbaar.

Gebruiksaanwijzing:

De initiële aanbrenging van de brace dient te worden uitgevoerd door een professional om een juiste pasvorm en efficiëntie te garanderen. In uitzonderlijke gevallen kan het bij zeer gevoelige gebruikers irritatie veroorzaken. In dat geval dient u contact op te nemen met uw arts. Niet te gebruiken in water. Aanbevolen productgebruik tot 2 jaar.

Reiniging en onderhoud

Handwas met koud water. Gebruik een mild reinigingsmiddel.
Niet wassen in de wasmachine of drogen in de droger.

Opslagconditie:

Zorg ervoor dat de producten worden opgeslagen op een droge plaats, vermijd hoge temperaturen (niet hoger dan 50°C) en vochtigheid (45%-90%).

In geval van een incident kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

Contact informatie:



A. Salemis & CO., LP "Medical Brace"

22, Tegeas st, Peristeri, PC.12133, Athens, GREECE

Tel: +302105984020 / email: mb@medicalbrace.gr

www.medicalbrace.gr

Symbolen op het etiket:

	CE-markering		Fabrikant
	Raadpleeg de Gebruiksaanwijzing		Medical device
	Niet-steriel		UDI
			Opslagtemperatuur
	Vermijd zonlicht		Houd droog