

Gebruiksaanwijzing

Doc. number: IFU- OCT, Ver.1, MB.2330

Nr.	Product naam	Spec.	Foto
1	Elastische elleboogsteun met siliconen TENNIS GOLFERS ELLEBOOG MB.2330	Elleboog omvang (cm) Maat: S(21-25), M(24-29), L(26-31), XL(29-33), XXL (33-37)	

Indicaties:

Alleen te gebruiken door personen met orthopedische problemen.

Behandeling van laterale epicondylitis (tenniselleboog)

Behandeling van mediale epicondylitis (golfelleboog)

Toepassing:

1. Zorg ervoor dat het de juiste maat is.
2. Draag de elleboogsteun in het ellebooggebied met het speciaal gebreide gebied dat de elleboog bedekt.
3. Zorg ervoor dat het siliconenkussen op de juiste hoogte van de condylus is gepositioneerd.

Belangrijkste eigenschappen:

- Hoogwaardige elleboogsteun, duurzaam, ademend en antiallergisch, voert vocht af.
- Interne siliconen pads voor golf- en tennisarm.
- Siliconen pad met strategische gaten voor mediale en laterale condylus.
- Speciaal ontwerp zorgt voor gemakkelijke gewrichtsbeweging.
- Geschikt voor werk en sport.
- Wasbaar.

Gebruiksaanwijzing:

De initiële aanbrenging van de brace dient te worden uitgevoerd door een professional om een juiste pasvorm en efficiëntie te garanderen. In uitzonderlijke gevallen kan het bij zeer gevoelige gebruikers irritatie veroorzaken. In dat geval dient u contact op te nemen met uw arts. Niet te gebruiken in water. Aanbevolen productgebruik tot 2 jaar.

Reiniging en onderhoud

Handwas met koud water. Gebruik een mild reinigingsmiddel.

Niet wassen in de wasmachine of drogen in de droger.

Opslagconditie:

Zorg ervoor dat de producten worden opgeslagen op een droge plaats, vermijd hoge temperaturen (niet hoger dan 50°C) en vochtigheid (45%-90%).

In geval van een incident kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

Contact informatie:



A. Salemis & CO., LP "Medical Brace"

22, Tegeas st, Peristeri, PC.12133, Athens, GREECE

Tel: +302105984020 / email: mb@medicalbrace.gr

www.medicalbrace.gr

Symbolen op het etiket:

	CE-markering		Fabrikant
	Raadpleeg de Gebruiksaanwijzing		Medical device
	Niet-steriel		UDI
			Opslagtemperatuur
	Vermijd zonlicht		Houd droog