

Gebruiksaanwijzing

Doc. number: IFU-OCT, Ver.1, MB.3031

Nr.	Product naam	Spec.	Foto
1	Duim stabilisator MB.3031	Pols omvang (cm) Size: S(14-18), L(18-22) Links – Rechts: Universeel	

Indicaties:

Alleen te gebruiken door personen met orthopedische problemen.

De Quervain syndroom, behandeling van artritis, letsels aan het metacarpofalangeale gewricht van de duim, behandeling van peesontsteking.

Toepassing:

1. Maak alle banden los.
2. Pas de steun aan naar de behoeften van de gebruiker.
3. Bevestig met behulp van het klittenband.

Belangrijkste eigenschappen:

- Duim immobilisator gemaakt van ademende en antiallergische Jersey-stof.
- Flexibele aluminium steun voor betere duimimmobilisatie.
- Anatomische en verstelbare spalk op de proximale falanx van de duim om beter aan de behoeften van de gebruiker te voldoen.
- Ondersteunt de duim terwijl de handpalm van de gebruiker vrij blijft.
- Biedt een elastische band met klittenband rond het polsgebied.
- Maakt vingerbeweging mogelijk.
- Geschikt voor zowel linker- als rechterhand.

Gebruiksaanwijzing:

De initiële aanbrenging van de brace dient te worden uitgevoerd door een professional om een juiste pasvorm en efficiëntie te garanderen. Vanwege hygiënische redenen wordt voorgesteld dat de brace door één persoon wordt gebruikt. In uitzonderlijke gevallen kan het bij zeer gevoelige gebruikers irritatie veroorzaken. In dat geval dient u contact op te nemen met uw arts. Niet te gebruiken in water. Aanbevolen productgebruik tot 2 jaar.

Reiniging en onderhoud

Controleer de staat van het product voor gebruik. Als het versleten is, moet het worden vervangen. Handwas met koud water. Gebruik een mild reinigingsmiddel. Laat op natuurlijke wijze drogen. Niet wassen in de wasmachine of drogen in de droger.

Opslagconditie:

Zorg ervoor dat de producten worden opgeslagen op een droge plaats, vermijd hoge temperaturen (niet hoger dan 50°C) en vochtigheid (45%-90%).

In geval van een incident kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

Contact informatie:



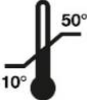
A. Salemis & CO., LP "Medical Brace"

22, Tegeas st, Peristeri, PC.12133, Athens, GREECE

Tel: +302105984020 / email: mb@medicalbrace.gr

www.medicalbrace.gr

Symbolen op het etiket:

	CE-markering		Fabrikant
	Raadpleeg de Gebruiksaanwijzing		Medical device
	Niet-steriel		UDI
			Opslagtemperatuur
	Vermijd zonlicht		Houd droog