

Gebruiksaanwijzing

Doc. number: IFU-OCT, Ver.1, MB.4003

Nr.	Product naam	Spec.	Foto
1	Elastische kniesteun gesloten MB.4003	Knie omvang (cm): S(25-35), M(30-40), L(35-45), XL(40-55), XXL (48-58)	

Indicaties:

Alleen te gebruiken door personen met orthopedische problemen.

Knieletsel en scheuren, eenvoudig knieletsel aan de knieschijf, zwellingen, ontstekingen, peesontsteking, artritis.

Toepassing:

1. Controleer of het de juiste maat is.
2. Plaats de brace op het kniegebied en zorg ervoor dat het goed past.

Belangrijkste eigenschappen:

- Elastische knieondersteuning, gemaakt van hoogwaardig, duurzaam materiaal.
- Speciale dubbel gebreide, ademende en antiallergische stof.
- Wasbaar.

Gebruiksaanwijzing:

De initiële aanbrenging van de brace dient te worden uitgevoerd door een professional om een juiste pasvorm en efficiëntie te garanderen. Vanwege hygiënische redenen wordt voorgesteld dat het door één persoon wordt gebruikt. In uitzonderlijke gevallen kan het bij zeer gevoelige gebruikers irritatie veroorzaken. In dat geval dient u contact op te nemen met uw arts. Niet te gebruiken in water.

Aanbevolen productgebruik tot 2 jaar.

Reiniging en onderhoud

Handwas met koud water. Gebruik een mild reinigingsmiddel.

Niet wassen in de wasmachine of drogen in de droger.

Opslagconditie:

Zorg ervoor dat de producten worden opgeslagen op een droge plaats, vermijd hoge temperaturen (niet hoger dan 50°C) en vochtigheid (45%-90%).

In geval van een incident kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

Contact informatie:



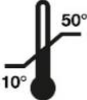
A. Salemis & CO., LP "Medical Brace"

22, Tegeas st, Peristeri, PC.12133, Athens, GREECE

Tel: +302105984020 / email: mb@medicalbrace.gr

www.medicalbrace.gr

Symbolen op het etiket:

	CE-markering		Fabrikant
	Raadpleeg de Gebruiksaanwijzing		Medical device
	Niet-steriel		UDI
			Opslagtemperatuur
	Vermijd zonlicht		Houd droog