

Gebruiksaanwijzing

Doc. number: IFU-OCT, Ver.1, MB.4010

Nr.	Product Naam	Spec.	Foto
1	Elastische kniebandage gesloten met siliconen en 4 baleinen MB.4010	Knie omvang (cm): S(25-35), M(30-40), L(35-45), XL(40-55), XXL (48-58) Lengte: 25cm	

Indicaties:

Alleen te gebruiken door personen met orthopedische problemen.
Knieletsel en scheuren, reumatoïde artritis, chondropathie van de knieschijf, patella-instabiliteit, laterale bandletsel.

Toepassing:

1. Controleer of het de juiste maat is.
2. Draag de knieondersteuning met siliconen ring zo dat het de knieschijf goed bedekt.
3. Zorg ervoor dat de mediale en laterale steunen zijn uitgelijnd.

Belangrijkste eigenschappen:

- Elastische knieondersteuning, gemaakt van hoogwaardig, duurzaam materiaal.
- Speciale dubbel gebreide, ademende en antiallergische stof.
- Gesloten knieschijf met een siliconen ring voor stabilisatie, verbeterde bloedcirculatie en lichte massage in het knieschijfgebied.
- Geschikt voor werk, sport en vrije tijd.
- Wasbaar.

Gebruiksaanwijzing:

De initiële aanbrenging van de brace dient te worden uitgevoerd door een professional om een juiste pasvorm en efficiëntie te garanderen. Vanwege hygiënische redenen wordt voorgesteld dat het door één persoon wordt gebruikt. In uitzonderlijke gevallen kan het bij zeer gevoelige gebruikers irritatie veroorzaken. In dat geval dient u contact op te nemen met uw arts. Niet te gebruiken in water. Aanbevolen productgebruik tot 2 jaar.

Reiniging en onderhoud

Handwas met koud water. Gebruik een mild reinigingsmiddel.
Niet wassen in de wasmachine of drogen in de droger.

Opslagconditie:

Zorg ervoor dat de producten worden opgeslagen op een droge plaats, vermijd hoge temperaturen (niet hoger dan 50°C) en vochtigheid (45%-90%).

In geval van een incident kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

Contact informatie:



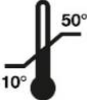
A. Salemis & CO., LP "Medical Brace"

22, Tegeas st, Peristeri, PC.12133, Athens, GREECE

Tel: +302105984020 / email: mb@medicalbrace.gr

www.medicalbrace.gr

Symbolen op het etiket:

	CE-markering		Fabrikant
	Raadpleeg de Gebruiksaanwijzing		Medical device
	Niet-steriel		UDI
			Opslagtemperatuur
	Vermijd zonlicht		Houd droog