

Gebruiksaanwijzing

Doc. number: IFU-OCT, Ver.1, MB.4050

Nr.	Product naam	Spec.	Foto
1	Neopreen kniebrace met kunststof scharnieren MB.4050	Knie omvang (cm): S(26-32), M(31-38), L(38-44), XL(43-49), XXL (48-54), 3XL(53-59+)	

Indicaties:

Alleen te gebruiken door personen met orthopedische problemen.

Conservatieve behandeling voor:

Letsel van de laterale kniebanden.

Gebruik bij sport voor het volgen van de knieschijf.

Toepassing:

1. Maak alle banden los.
2. Plaats de kniebrace om de voet van de gebruiker (Foto 1). Trek de brace naar het dijbeen om de knie te bedekken (Foto 2).
3. Lijn het gat uit met de knieschijf en zorg ervoor dat de steunen aan de rechter- en linkerzijde van de knieschijf zitten (Foto 3).
4. Bevestig de klittenbandsluitingen totdat het gewenste ondersteuningsniveau is bereikt (Foto 4).



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

Belangrijkste eigenschappen:

- Ademende, Neopreen knieondersteuning.
- Spiraalvormige spalken voor extra ondersteuning.
- Dijopening voor gemakkelijkere aanbreng.
- Dij- en kuit sluiting met klittenbandsluiting voor betere pasvorm.
- Circulaire ring beperkt de beweging van de knieschijf.
- Geschikt voor werk en vrije tijd.
- Wasbaar.

Gebruiksaanwijzing:

De initiële aanbrenging van de brace dient te worden uitgevoerd door een professional om een juiste pasvorm en efficiëntie te garanderen. Vanwege hygiënische redenen wordt voorgesteld dat het door één persoon wordt gebruikt. In uitzonderlijke gevallen kan het bij zeer gevoelige gebruikers irritatie veroorzaken. In dat geval dient u contact op te nemen met uw arts. Niet te gebruiken in water. Aanbevolen productgebruik tot 2 jaar.

Reiniging en onderhoud

Controleer de staat van het product voor gebruik. Als het versleten is, moet het worden vervangen. Handwas met koud water. Gebruik een mild reinigingsmiddel. Niet wassen in de wasmachine of drogen in de droger.

Opslagconditie:

Zorg ervoor dat de producten worden opgeslagen op een droge plaats, vermijd hoge temperaturen (niet hoger dan 50°C) en vochtigheid (45%-90%).

In geval van een incident kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

Contact informatie:

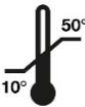
A. Salemis & CO., LP "Medical Brace"

22, Tegeas st, Peristeri, PC.12133, Athens, GREECE

Tel: +302105984020 / email: mb@medicalbrace.gr

www.medicalbrace.gr

Symbolen op het etiket:

	CE-markering		Fabrikant
	Raadpleeg de Gebruiksaanwijzing		Medical device
	Niet-steriel		UDI
			Opslagtemperatuur
	Vermijd zonlicht		Houd droog