

Maatvoering

PRO COMPRESSION SOCKS & TUBES							
Meetpunten		1	2	3	4	5	6
1	omvang onder de knie	28 - 35	31 - 38	34 - 41	37 - 44	40 - 47	43 - 50
2	grootste kuitomvang	30 - 37	33 - 40	36 - 43	39 - 46	42 - 49	45 - 52
3	omvang enkel	19 - 21	21 - 23	23 - 25	25 - 27	27 - 29	29 - 31
4	hiel-wreeflijn	28 - 34	30 - 36	32 - 38	34 - 40	35 - 41	37 - 43
5	Beenlengte Gemeten vanaf de grond tot 1 cm onder de knieplooi.						
	kort been	34 - 39 cm	kort	kort	kort	kort	
	lang been	39,1 - 46 cm	lang	lang	lang	lang	lang
	extra lang been	46,1 - 52 cm	extra lang	extra lang	extra lang	extra lang	extra lang
6	Schoenmaat EUR						
	kleine voet	36 - 39	klein	klein	klein	klein	
	grote voet	40 - 44	groot	groot	groot	groot	groot
	extra grote voet	45 - 48		extra groot	extra groot	extra groot	extra groot

Opmeetinstructie



1. Meet de **omvang van het been** 1cm onder de knieplooi.
2. Meet dan de **grootste omvang** van de kuit.
3. Vervolgens meet u de **kleinste beenomvang**, net boven de enkelknobbels.
4. Meet **hiel-wreeflijn**.
5. Meet de **lengte van het been**. kort (34-39cm), lang (39,1-46cm) of extra lang (46,1-52cm).
6. Voetmaat: bepaal de **voetmaat**, klein (36-39), groot (40-44) of extra groot (45-48).

Let op: Soms past het been binnen twee confectieschema's, kies dan voor die maat waar de kuitomvang, dus opmeetpunt 2, zoveel mogelijk centraal binnen het schema valt.